


CORONA TEST

graubünden.
grischun.
grigioni.



Anleitung Speicheltest

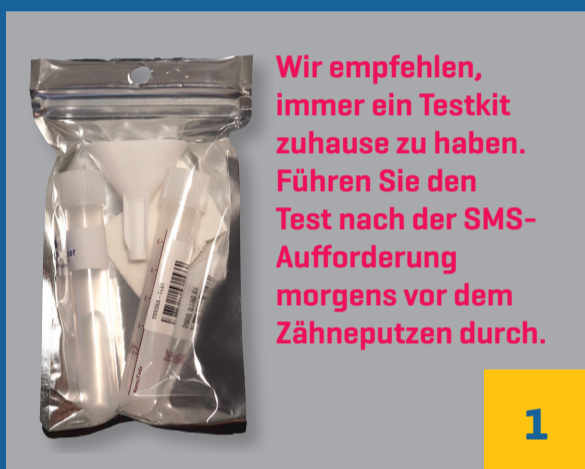

Wir empfehlen,
immer ein Testkit
zu Hause zu haben.
Führen Sie den
Test nach der SMS-
Aufforderung
morgens vor dem
Zähneputzen durch.


1

Test abholen bei Nimm-Station im Betrieb



2

Auspacken

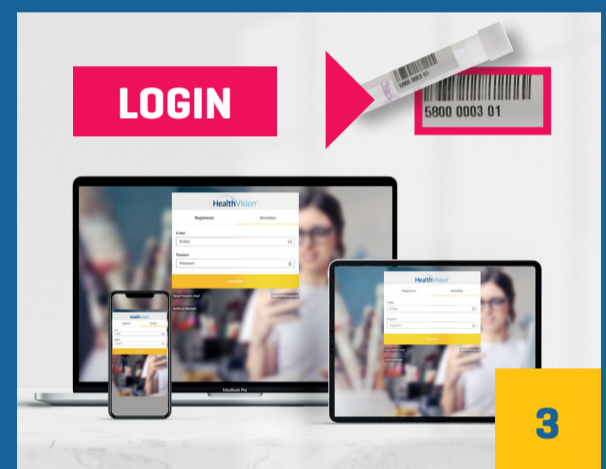

LOGIN

3

Barcode auf Web-Plattform
(www.wirtesten.ch) eingeben



4

Wasser aus Wasserröhrchen
60 Sekunden durch Mund spülen



5

Trichter aufsetzen



6

Lösung in Trichter geben



7

Gut verschliessen
5-10 Sekunden sanft schütteln



8

Röhrchen zurück in Beutel legen



9

Beutel an Bring-Station deponieren

IMPFFEN & TESTEN