


# CORONA TEST

graubünden.  
grischun.  
grigioni.



## Istruzioni per il test della saliva

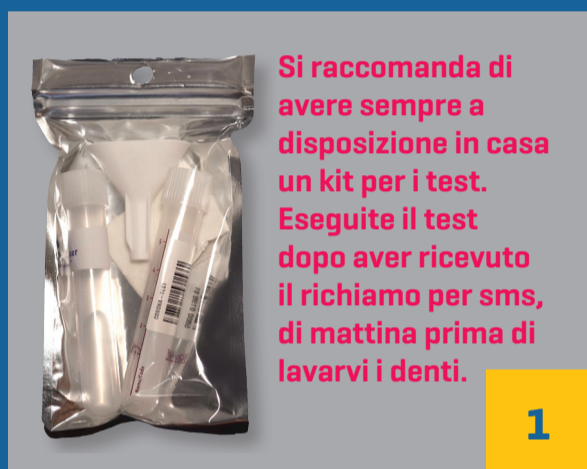

Si raccomanda di avere sempre a disposizione in casa un kit per i test. Eseguite il test dopo aver ricevuto il richiamo per sms, di mattina prima di lavarvi i denti.


1

ritirare il test presso il punto di distribuzione dell'azienda



2

rimuovere l'imbullaggio

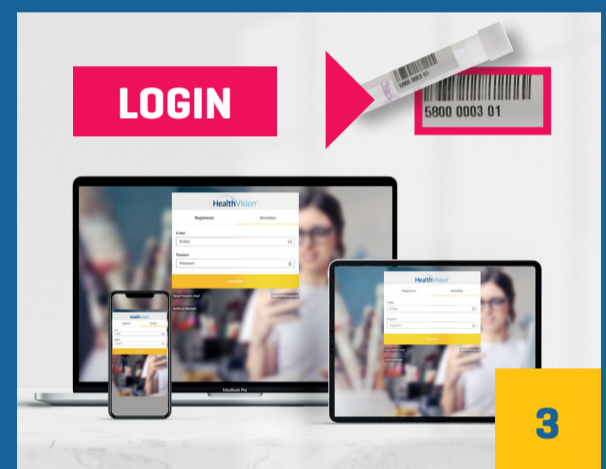

LOGIN

3

inserire il codice a barre nella piattaforma web [[www.testiamoci.ch](http://www.testiamoci.ch)]




4

risciacquarsi la bocca con l'acqua del contenitore per 10 secondi



5

posizionare l'imbuto

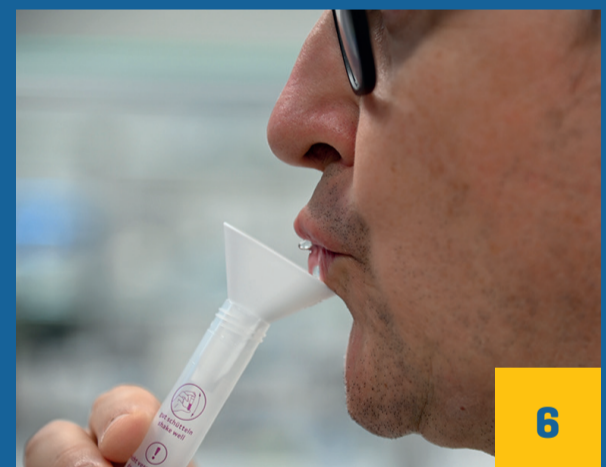

6

introdurre la soluzione nell'imbuto



7

richiudere bene, agitare delicatamente per 5-10 secondi



8

rimettere il tubetto nel sacchetto



9

depositare il sacchetto presso il punto di consegna

# VACCINARE & TESTARE



Kanton Graubünden  
Chantun Grischun  
Cantone dei Grigioni